

FORMADES

M-WIPES



DESINFEKTIONS TÜCHER

Produktbeschreibung

Durch die Einzelblattentnahme sind M-Wipes sehr sparsam im Verbrauch. Die Entnahme erfolgt aus einem praktischen wiederverschließbaren Spendersystem. Eine Rolle M-WIPES besteht aus 70 oder 90 Wischtüchern à 30 cm x 30 cm.

Anwendungsbereiche

M-WIPES werden zur Flächendesinfektion und Reinigung in sämtlichen Bereichen medizinischer Einrichtungen angewendet: Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen, Laboratorien, Küchen sowie in der Lebensmittelindustrie.

Anwendung

- Handschuhe anziehen
- Vor Befüllung mit einer neuen Tuchrolle muss der Feuchttuchspender / die Spenderdose gründlich aufbereitet werden
- Desinfektionsmittel und Tuchreste entfernen
- Reinigung des Spenders durch Auswischen mit einem getränkten Reinigungstuch oder Ausspülen mit heißem Wasser (70°C), anschließend abtrocknen lassen (Spülmaschinene geeignet bis 70°C)
- Desinfektion aller Oberflächen des Spenders einschließlich dem Deckel und der Entnahmeöffnung mit einem Schnelldesinfektionsmittel oder Schnelldesinfektionstuch (z. B. Formades Rapid Pur, Formades Wipes), anschließend abtrocknen lassen
- Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und auf desinfiziertem Deckel abstellen Vliestuchrolle in gereinigten, desinfizierten und abgetrocknetem Feuchttuchspender einsetzen
- Konzentrat mit entsprechender Menge Wasser / gebrauchsfertige Lösung einfüllen
- Vliestuch von unten durch die sternförmige Entnahmeöffnung führen und Deckel aufsetzen, 1. Tuch werfen
- beigefügtes Chargenetikett ausfüllen und aufkleben

Unsere Empfehlung für ein sicheres System in Kombination mit FORMADES GF, FORMADES RAPID und FORMADES FORTE.
(Füllmenge M-Wipes 70 Blatt 2 Ltr., M-Wipes 90 Blatt 2,5 Ltr.)

FORMADES GF

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid: konz. 1 min.
Virusinaktivierend HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Influenza-/ Grippe-Viren: konz. 30 Sek.

FORMADES Rapid PUR

Bakterizid (inkl. MRSA),
tuberkulozid, levurozid: konz. 1 Min.
Virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV,
Vaccinia, BVDV, Influenza-/ Grippe-Viren): konz. 30 Sek.
Noro-Viren: konz. 1 Min.

FORMADES FORTE

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
2 % (20g/l) - 5 Min.
1 % (10g/l) - 15 Min.
0,5 % (5g/l) - 60 Min.
0,25 % (2,5g/l) - 240 Min.

Virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV,
Vaccinia, BVDV, Influenza-/ Grippeviren): 1% - 15 Min.
Noro-Viren: 1% - 60 Min.

Lieferformen

M-WIPES 70 Tücher à 30 cm x 30 cm
M-WIPES 90 Tücher à 30 cm x 30 cm



care integral
Hanseatische Handelsgesellschaft

Vertrieb und Verkauf über:

care integral GmbH
Pohnsdorfer Straße 3
23611 Bad Schwartau

Tel.: 0451 / 29 22 080
Fax: 0451 / 29 22 08 10
www.care-integral.de