

FORMADES

SCHNELLEDESINFEKTION



praktisches Flowpack

begrenzt viruzid PLUS



PLUS PURE WET WIPES XL

Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen

- frei von Aldehyden
- gebrauchsfertige, getränkte Tücher
- auf allen alkoholbeständigen Oberflächen anzuwenden
- Tuchgröße: 30 x 30 cm
- XL-Format, für größere Flächenleistung
- Medizinprodukt

Bakterizid	konz. 1 min.
Candida albicans	konz. 1 min.
TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium)	konz. 1 min.
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV)	konz. 1 min.
Begrenzt viruzid Plus (Noro-, Adeno und Rota-Viren)	konz. 1 min.
Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung)	konz. 1 min.

Wirkstoffe

In 100g Tränkflüssigkeit sind enthalten:
20,0g 1-Propanol, 5g 2-Propanol

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):
Gefahr; GHS02, GHS07

Einsatzbereich

Gebrauchsfertige, alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich. Geeignet zur Schnelldesinfektion von allen alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

Anwendung

1. Das Chargenetikett vom Beutel abziehen und auf den Entnahmeeimer kleben. Das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum muss händisch auf dem dafür vorgesehenen Feld dokumentiert werden.
2. Beutel oben öffnen und in den aufbereiteten Entnahmeeimer stellen.
3. Das erste Tuch der Vliesrolle anziehen und durch den Stern im Deckelverschluss fädeln.
4. Den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen.
5. Erstes Tuch werfen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und einwirken lassen. Behälter immer verschließen. Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels für 28 Tage im Entnahmeeimer verwendbar.

Hinweise

Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Haltbarkeit geöffnet: 28 Tage
Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett

Gebinde	Inhalt	VE	Art.Nr.	PZN
Standbeutel	90 Tücher (30 x 30 cm)	2	65705	17519108

BAuA-Reg. Nr. N-81830

pH 0044

Stand 08/2021

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb durch:
unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Str. 3
23611 Bad Schwartau

Telefon: 0451 - 39 89 00
Telefax: 0451 - 39 39 93
E-mail: info@unizell.de

Hersteller:
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Tanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080

unizell